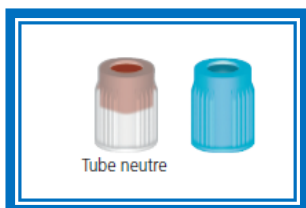


Les résultats du bilan d'hémostase sont conditionnés par la qualité des étapes préanalytiques qui vont de la prescription au prélèvement jusqu'à l'acheminement au laboratoire. Elles doivent être en accord avec les recommandations du GFHT (Groupe Français d'Hémostase et Thrombose).

Prélèvement

Il est impératif de respecter l'**ordre des tubes** pour le prélèvement (LDT-DS-0001).

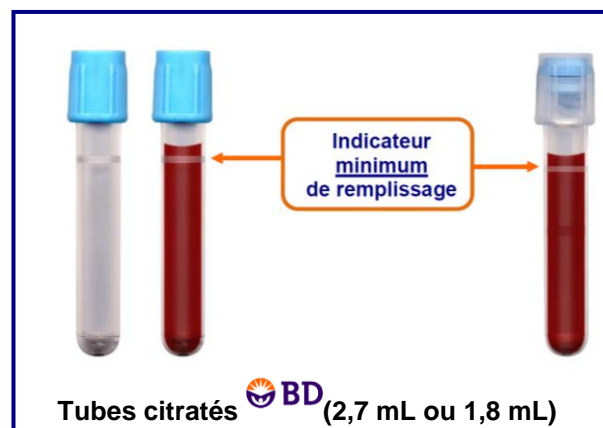

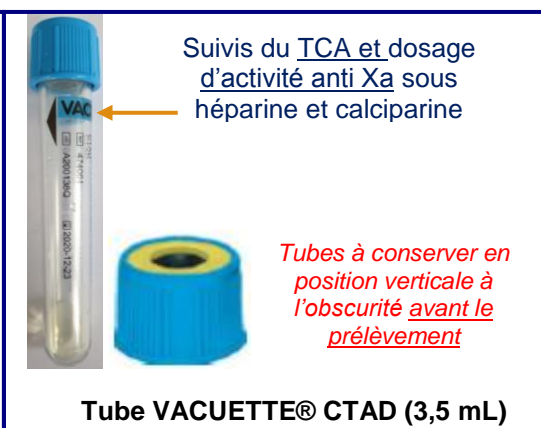

Si la ponction veineuse est franche, **prélever le tube d'hémostase en première position** afin d'éviter les contaminations par les additifs ou les anticoagulants présents dans tous les autres tubes.



Prendre 1 mL de sang dans un tube de purge (neutre) au préalable en cas de

- Prélèvement avec une **unité à ailettes** (purgé de l'air)
- **Prélèvement difficile** (activation de la coagulation)
- **Bilans spécialisés** (Exploration TCA, Willebrand, PFA, agrégation plaquettaire, Test Verifynow®)

4 types de tubes citratés pour l'hémostase

 <p>Indicateur minimum de remplissage</p> <p>Tubes citratés  (2,7 mL ou 1,8 mL)</p>	 <p>Suivis du TCA et dosage d'activité anti Xa sous héparine et calciparine</p> <p><i> Tubes à conserver en position verticale à l'obscurité avant le prélèvement </i></p> <p>Tube VACUETTE® CTAD (3,5 mL)</p>	 <p>Test Verifynow® (étude antiagrégants plaquettaires)</p> <p>Disponible au centre de prélèvement</p> <p>citraté (2,7mL)</p>
--	--	---

Desserrer le garrot dès que le sang afflue dans le tube (< 1 minute)

Laisser le tube se remplir complètement

Homogénéiser par 3 ou 4 retournements lents pour mélanger le sang à l'anticoagulant du tube

Bilan	Bilan standard	TCA héparine, calciparine Anti-Xa : héparine, calciparine	DDimère Vidas PFA (8h-16h, pas de tube CTAD, pas de pneumatique 😊)	Exploration TCA allongé Bilan antiphospholipide Bilan de thrombophilie Maladie de Willebrand Hémophilie Bilan de TIH II (sur RV)	Agrégation plaquettaire Etude des GP plaquettaires par CMF (sur rendez-vous)
Nombre de tube	1 tube citaté	1 tube CTAD	1 tube normal citaté (éviter tube pédiatrique)	4 tubes normaux citratés au total (ne pas cumuler le nombre de tubes)	6 tubes normaux citratés Pas de CTAD Pas de pneumatique 😊

Renseignement et transport

Signaler tout problème éventuel lors du prélèvement

Ne pas séparer les tubes d'un même prélèvement : Joindre tous les tubes et bords dans la même poche y compris le tube neutre

Indiquer le contexte clinicobiologique et **le traitement anticoagulant**

Transport le **plus rapide possible < 2 heures**



Pas de transport par pneumatique pour : PFA, agrégation plaquettaire, Test Verifynow®, CMF.

Service d'Hématologie biologique, secteur hémostase, poste 47210 (51062) ou 48228