



Laboratoire
du CHU
de Limoges

**BIOLOGIE MOLECULAIRE -
Notice d'utilisation du kit
ORAgene pour prélèvement
salivaire**
Mode opératoire

LHEM ABM 0083 A

Approuvé par :
NATHALIE GACHARD
RESP. QUALITE
BIOLOGISTE RESP.
CYTOGENETIQUE, BIO. MOL.
THERAPIE CELL.

Page 1/3


Pour utilisation de kit ORAgene ref OG-500/510

Recommandations :



Ne pas manger, boire, fumer ou mâcher du chewing-gum pendant
les 30 min précédant le prélèvement de salive

En cas de défaut de salive, voici comment augmenter la sécrétion de salive :

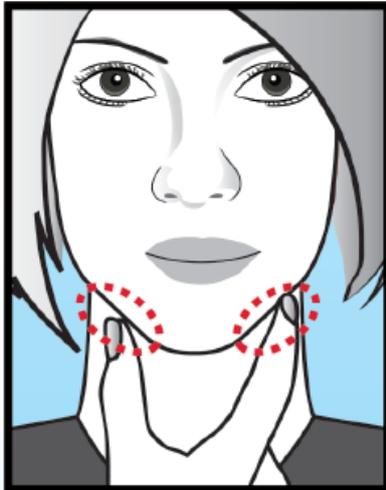

Masser lentement les glandes
salivaires pendant 30s avec vos
index.




Passer plusieurs fois votre langue
sur votre palais



Aspirer vos joues plusieurs fois

Contenu du kit de prélèvement :

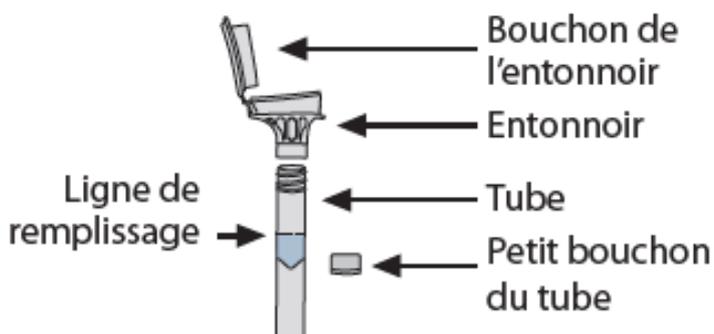

**NE PAS retirer le film plastique
du bouchon de l'entonnoir**



Laboratoire
du CHU
de Limoges

BIOLOGIE MOLECULAIRE - Notice d'utilisation du kit ORAgene pour prélèvement salivaire

Mode opératoire

LHEM ABM 0083 A


Approuvé par :
NATHALIE GACHARD
RESP. QUALITE
BIOLOGISTE RESP.
CYTOGENETIQUE, BIO. MOL.
THERAPIE CELL.

Page 2/3

Instructions de prélèvement :




1. Ouvrir le coffret

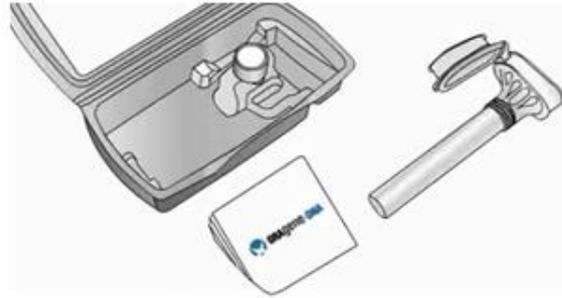

2. Retirer les instructions et le tube avec l'entonnoir. Laisser le petit bouchon dans le coffret pour une utilisation ultérieure




3. Placer le haut de l'entonnoir au niveau de votre lèvre inférieure

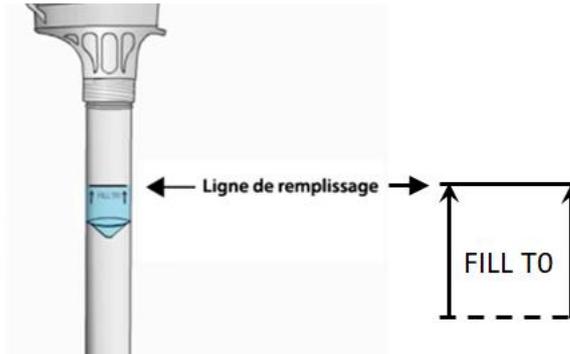


4. Cracher dans l'entonnoir jusqu'à ce que la salive (et non les bulles) atteigne la ligne de remplissage située sur le côté du tube

NB : Vous pouvez taper le tube doucement sur la table pour éliminer les bulles si nécessaire

Prélèvements corrects

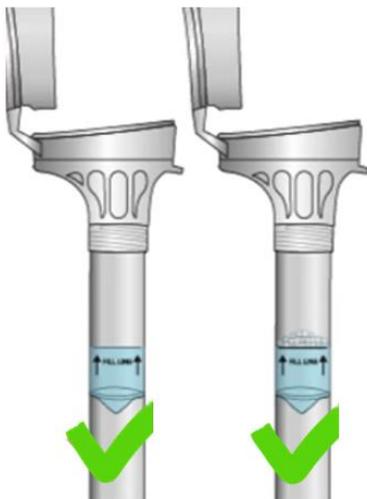


Prélèvements insuffisants

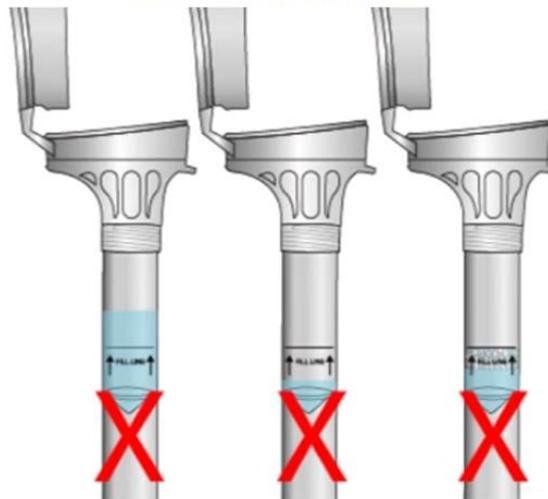

Votre salive doit atteindre la ligne de remplissage : pas au dessous, ni au-dessus




5. Tenez le tube à la verticale d'une main. De l'autre, fermer le bouchon de l'entonnoir en le poussant fortement jusqu'à entendre un claquement fort

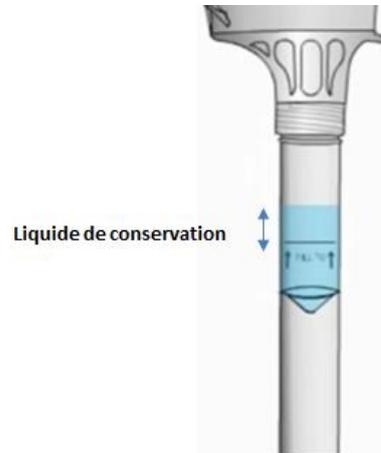

Le liquide se trouvant dans le bouchon est libéré dans le tube et se mélange à la salive.



6. Tenir le tube à la verticale. Dévisser l'entonnoir du tube puis le jeter

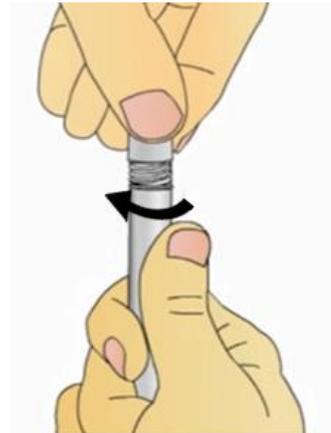

7. Utiliser le petit bouchon pour bien fermer hermétiquement le tube



8. Agiter le tube fermé pendant 5 secondes



7. Placer le tube bien refermé dans le sachet « RigidSafetyBag ». Fermer le sachet avec l'adhésif. Identifier le prélèvement sur la face blanche du sachet : Nom prénom, DDN, date et heure du prélèvement